

BD Venflon™ Pro Safety

Praktijktips

Vernieuwd ontwerp



- Pas uw gebruikelijke greep toe en verwijder het hoesje van de naald.
- Benader de vene onder lage hoek.
- Zodra bloed verschijnt, verklein de insteekhoek tot bijna evenwijdig met de huid.



- Schuif de katheter lichtjes op, 2 tot 3 mm, om zeker te zijn dat de kathetertip in de vene zit.
- U kan overwegen de katheter te stabiliseren door één van de vleugels vast te houden.
- Trek de naald 2 tot 3 mm terug.



- De tweede bloedreflux tussen de naald en de katheter bevestigt correcte plaatsing van de katheter in de vene.
- Schuif de katheter geheel op in de vene.
- Verwijder de stuwband.



- Stabiliseer de katheter door één vleugel vast te houden.
- Druk met de wijs- of middelvinger de vene aan de kathetertip af en houd de naald bij de naaldgreep vast terwijl u hem terugtrekt.



- Neem de naald **niet** bij het veiligheidsmechanisme vast.



- Werp de naald in een naaldencontainer.

BD Medical
België :
T: +32 53 72 02 11
F: +32 53 72 02 00

Nederland :
T: +31 20 582 94 16
F: +31 20 582 94 21

www.bd.com/europe/safety
info.benelux@bd.com

 **BD**
Advancing the
world of health