

mediven® thrombexin® 18

Tromboseprofylaxe kous met 18 mm Hg op de enkel.

Indicaties

- Voor immobiele patiënten pre-, per- en postoperatief.
- Onmiddellijk pre- en postpartum.
- Voor bedlegerige patiënten.
- Ook te gebruiken als onderkous na scleroseren (bijv. in combinatie met mediven struva 23).

Werking

De mediven thrombexin heeft een gelijkmatig drukverloop van distaal naar proximaal. Hierdoor is er een toename van de veneuze bloedstroom, zowel qua snelheid als volume. Door een speciale dubbelrekse breitechniek zijn er geen lengtematen noodzakelijk. De mediven thrombexin 18 is verkrijgbaar tot een dijbeenomvang van 100 cm.

Voordelen

- Anatomische gebreide kous met een exact gedefinieerd drukverloop.
- Eenvoudig in gebruik en tijdsbesparend, waardoor het verplegend personeel wordt ontlast en de patiëntenverzorging wordt geoptimaliseerd.
- Maatsysteem met kleurcodering voor een snelle en correcte maatkeuze.
- Hoog draagcomfort door de hoge elasticiteit en het bijzonder zachte, huidvriendelijk en ademende breisel.
- Hoge efficiency door meervoudig gebruik.

Materiaalsamenstelling

Latexvrij	Elastan	Polyamide(PA)
	18%	82%

medi Nederland BV
Postbus 5503
4801 DD Breda
T (076) 57 22 555
info@medi.nl
www.medi.nl

I feel better.

Producteigenschappen

mediven thrombexin 18 garandeert een optimale drukverhouding: de compressiedruk op het been neemt gelijkmatig af, van distaal naar proximaal.



Intelligent siliconenboord

Het speciaal ontworpen intelligente siliconenboord zorgt dat de kous niet afzakt en geeft in een oogopslag de juiste pasvorm aan.



Kleurgecodeerde hiel

De kleurgecodeerde hiel met een zachte binnenkant, reduceert de kans op decubitus en geeft een correcte pasvorm van de hiel aan.



Inspectieopening


De onopvallende inspectieopening aan de onderkant van de voetzool, dient ter controle van de doorbloeding en vermindert gelijktijdig het risico op uitglijden.



Hygiënisch teenstuk

Het antibacteriële teenstuk reduceert bacteriën en schimmelinfecties tussen de tenen en de teenaanzet. Zelfs na veelvuldig wassen.

Aanmeetinstructies

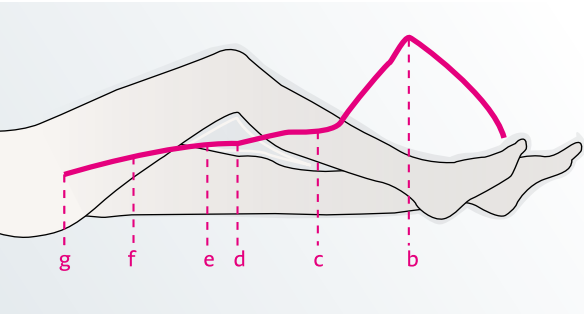

Gradueel drukgradiënt


De compressiedruk op het been neemt gelijkmatig af, van distaal naar proximaal.

Aantrekhelp


Het aantrekken van tromboseprofylaxe kousen is met de innovatieve medi hospital butler voor patiënt en verplegend personeel eenvoudig en comfortabel.




Een perfecte pasvorm in twee eenvoudige stappen

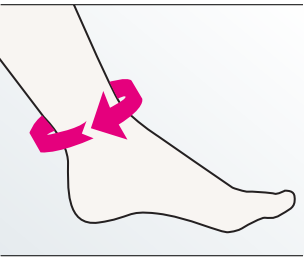

De omvang van het been op het dunste vlak boven de enkel (cB)...

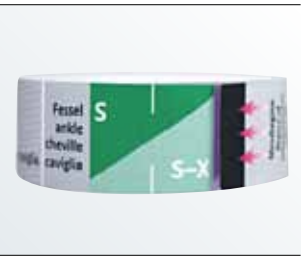

...bepaalt de maat van de kous.

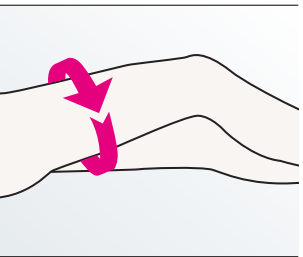

Voor het aanmeten van een dijbeenkous wordt vervolgens....



....de dijbeenomvang (cG) ca. 5 cm onder de lies gemeten.

Indien een patiënt tussen twee maten in valt, neemt men de kleinste maat van de twee, indien de dijbeenomvang dit toelaat.

Maatschema

Kniekous						
Maat	Omvangsmaten* (in cm)				Kleurmarkering	
	Enkel (cB)	Kuit (cC)	Bovenbeen (cG)	Lengte (AD)	Hiel	Bovenbeen
XS	17 - 19	26 - 32	-	35 - 45	oranje	-
S	20 - 22	30 - 38	-	35 - 45	groen	-
M	23 - 25	34 - 44	-	35 - 45	paars	-
L	26 - 28	38 - 48	-	35 - 45	blauw	-
L-X	26 - 28	44 - 55	-	35 - 45	grijs	-
Dijbeenkous met heupbevestiging						
S	20 - 22	30 - 36	48 - 60	65 - 85	groen	groen
M	23 - 25	34 - 40	56 - 70	65 - 85	paars	paars
L	26 - 28	38 - 45	64 - 80	65 - 85	blauw	blauw
L-X	26 - 28	38 - 45	72 - 90	65 - 85	blauw	grijs
Dijbeenkous met noppen siliconenboord						
XS	17 - 19	26 - 30	40 - 50	60 - 80	oranje	oranje
S	20 - 22	30 - 36	48 - 60	65 - 85	groen	groen
S-X	20 - 22	30 - 36	56 - 70	65 - 85	groen	grijs
M	23 - 25	34 - 40	56 - 70	65 - 85	paars	paars
M-X	23 - 25	34 - 40	64 - 80	65 - 85	paars	grijs
L	26 - 28	38 - 45	64 - 80	65 - 85	blauw	blauw
L-X	26 - 28	38 - 45	72 - 90	65 - 85	blauw	grijs
XL	29 - 31	42 - 49	72 - 90	65 - 85	rood	rood
XL-X	29 - 31	42 - 49	80 - 100	65 - 85	rood	grijs

* Maten in hele getallen
Bij de maatopgave worden ten gunste van een betere hantering en leesbaarheid hele centimeters aangegeven. Er is voldoende speling bij de maten om mogelijke hiaten die hieruit kunnen voortvloeien op te vangen. Bij de maatbepaling gelden de internationale afrondingsregels (naar beneden tot 4/10, naar boven vanaf 5/10). Bij de vormgeving van het speciale papieren meetlint, dat door de producent beschikbaar wordt gesteld, is hiermee rekening gehouden.